

Certificat pentru ciorapi

Tocmai ați primit noii ciorapi medicali de compresie de la BELSANA – confecționați conform măsurătorilor dvs. individuale. Pentru ca terapia de compresie să fie eficientă pe termen lung, vă recomandăm să consultați din nou medicul după șase luni. Dacă este necesar din punct de vedere medical, acesta vă poate elibera o nouă rețetă. Vă rugăm să prezentați acest certificat pentru ciorapi la următoarea comandă.

Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi!

Certificat pentru ciorapi

Produsul dvs. personalizat este aici!

Pentru a face simplă și ușoară comanda ulterioară a următoarei rețete, veți găsi în partea stângă **certificatul personal pentru ciorapi** cu toate informațiile relevante. Pur și simplu dezlipiți-l, pliați-l și păstrați-l în siguranță.

Cu cele mai bune recomandări
Echipa dvs. BELSANA



Etichetă cu instrucțiuni pentru spălarea la mașină

Spălați corect ciorapii de compresie

Vă rugăm să spălați ciorapii pe dos și să nu utilizați balsam de rufe!

 Ciclu de spălare pentru rufe delicate

 Nu utilizați înălbitori

 Uscăți cu grijă

 Nu călcați

 Nu curățați chimic



BELSANA

Spălarea

- adecvați pentru folosirea imediată
- recomandare: spălați ciorapii înainte de prima purtare
- spălare zilnică (max. 40°C), la mână sau la programul delicat de spălare al mașinii
- separat cu detergent delicat (de ex. „detergent BELSANA blau40”), nu folosiți balsam de rufe
- clătiți riguros, centrifugați delicat, dar nu stoarceți
- uscați la aer pe un prosop sau la programul delicat al uscătorului, nu călcați niciodată și nu uscați pe calorifer sau la soare

Compoziția materialului

Poliamidă (Polyamid), elastan (Elastan) și, în cazul anumitor produse, bumbac (Baumwolle). Pe eticheta textilă cusută pe ciorapul dvs. se află toate datele concrete.

Întreținerea

- a se păstra la loc uscat, ideal în ambalajul original, protejați de lumina directă a soarelui și de căldură
- Evitați contactul ciorapilor cu benzi adezive acoperite cu silicon cu solvenți, unguente, creme și loțiuni hidratante de spălare, deoarece aderența poate fi afectată permanent
- acordați atenție îngrijirii regulate a picioarelor și încălțăminte corespunzătoare
- scămoșarea reprezintă un proces normal în cazul textilelor și nu reprezintă un motiv de reclamație
- nu reparați niciodată singuri daunele produse ciorapilor, ci aduceți-i înapoi la distribuitorul de la care au fost cumpărați ciorapii

Scopul propus

Ciorapii compresivi sunt utilizați în tratamentul afecțiunilor flebologice și limfologice ale brațelor și picioarelor, precum și în cazul lipedemelor. În funcție de indicațiile medicului, se vor folosi produse diferite.

⚠ Indicații importante

- purtați ciorapii de compresie numai după consultarea unui medic
- purtarea zilnică și controalele regulate asigură succesul tratamentului
- personalul instruit din punct de vedere medical trebuie să ofere indicații și recomandări cu privire la modul corect de purtare
- în caz de dureri acute ale piciorului sau reacții cutanate, vă rugăm să consultați imediat medicul
- deplasarea ușoară regulată a benzii adezive poate preveni iritarea pielii
- dacă întâmpinați probleme legate de calitate sau aveți reclamații, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat

Efectele ciorapilor compresivi medicali

În urma utilizării produselor conform indicațiilor și datorită presiunii controlate exercitate, întoarcerea sângelui este accelerată, microcirculația din țesuturi este îmbunătățită, iar fluxul limfatic este sport.



Pentru farmacie: Datele ciorapilor pentru arhivare

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

BELSANA

Împreună ne vom asigura că rămâneți pe picioare în formă!

materiale și coloranți inofensivi.

Oko-Tex 100, care stipulează utilizarea de

(RAL-GZ 387/1) și îndeplinește standardele

pentru ciorapii medicali de compresie

reglementări de calitate și testări din lume

corespunde, de exemplu, cu cele mai stricte

Produsul dvs. BELSANA realizat la comandă

noastre.

gestionarea responsabilă a produselor

testare independente documentează

Certificările periodice de către institutele de

prin utilizarea celei mai moderne tehnologii.

ridicat de calitate sunt asigurate și controlate

și dezvoltate. Prelucrarea atentă și nivelul

comandă purtați rezultatul anilor de cercetare

Cu produsul dvs. BELSANA realizat la

de la firma BELSANA

Calitate de top

Indicații

- Ameliorarea simptomelor venoase și a versajului 12/18)
- Tratamentul Compresiv AWMF 037/005, (a se vedea și Directiva Medicală privind
- calității vești în cazul bolilor venoase cronice
- Prevenția și tratamentul edemelor venoase
- Prevenția și tratamentul modificărilor de origine
- venoasă a tegumentelor
- Eceme și pigmentări
- Dermatitidoposcleroză și atrofie albă
- Tratamentul durerilor în cazul Ulcus
- Ulcus cruris arterial și venos
- (a se vedea și contraindicațiile)
- Varicoză
- Faza inițială de după tratamentul varicozei
- Insuficiență venoasă funcțională
- Malformații venoase
- Tromboză venoasă
- Starea de după tromboză
- Sindrom posttrombotic
- Profilaxia trombozei în cazul pacienților mobili
- Limfedeme
- Edeme în sarcină
- Edeme posttraumatice/postoperatorii
- Edeme ciclice idiopatice
- Lipedeme începând cu stadiul II
- Congestii în urma imobilității (sindrom de
- congestie artrogener, pareze și pareze parțiale ale
- extremități)
- Edeme apărute în urma expunerii profesionale
- (profesii care presupun statul în picioare sau
- sezutul pe durate mari de timp)

⚠ Riscuri și efecte adverse

În cazul nerespectării contraindicațiilor nu ne asumăm nicio răspundere.

- Poliarritmii cronice
- (de ex. diabet zaharat)
- Tulburări senzoriale grave ale extremității
- Neuropatie periferică în stadiu avansat
- Ciorapii compresivi
- Dermatotoze umede
- Alergie la materialele din care sunt fabricați
- Boala arterială periferică occlusivă în stadiu avansat
- Insuficiență cardiacă decompensată
- Flebită septică
- Phlegmasia coerulea dolens
- Contraindicații absolute
- Stare după arsuri
- Tratamentul cicatricei
- Obesitate nu pot fi schimbate
- Edeme cauzate de medicamente, atunci când

Contraindicații relative

- Contraindicații absolute
- Stare după arsuri
- Tratamentul cicatricei
- Obesitate nu pot fi schimbate
- Edeme cauzate de medicamente, atunci când

Contraindicații relative

- Contraindicații absolute
- Stare după arsuri
- Tratamentul cicatricei
- Obesitate nu pot fi schimbate
- Edeme cauzate de medicamente, atunci când

Obligația de notificare

Vă rugăm ca la finalul duratei de utilizare să

eliminați produsul în conformitate cu

reglementările locale.

Eliminarea

produsului nu mai are obligația de acordare

care este transmis spre utilizare altor persoane,

apărute în urma uzurii obișnuite sau a unei

firmă producătoare. Produsul este destinat

produsului, care nu a fost realizat de către

înseamnă și modificarea, după achiziționare, a

utilizării necoforme. Utilizarea necoformă

mai sunt excluse, din principiu, și defectele

regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare.

După expirarea acestui termen, produsele nu

cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări

trebuie ținut cont și de durata de purtare de

în condiții corecte timp de 3 ani. Totodată,

Ciorapii compresivi medicali pot fi depozitați

Garantie

picioare, senzații ciudate sau de amortăală,




excesivă, limitări acute ale mișcărilor.

Instrucțiuni de îmbrăcare a ciorapilor cu vârf închiis

1. Întoarceți pe dos ciorapul până la nivelul labei piciorului. Introduceți degetele de la picioare, apoi trageți peste laba piciorului.

2. Acum trageți ciorapul cu atenție peste călcâi. Vă rugăm să evitați să trageți ciorapul de marginea superioară sau de banda adezivă.

3. Trageți restul ciorapului uniform pe lungimea piciorului, fără a-l întinde. La final distribuiți ciorapul uniform, astfel încât să nu rămână cute.

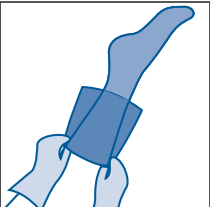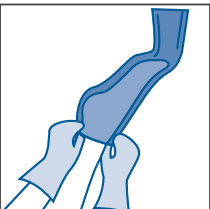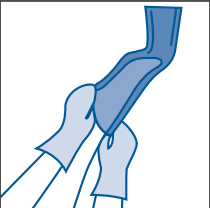

Purtarea lor este ușoară - cu instrucțiunile practice!