

## Certificat pentru ciorapi

Tocmai ați primit noii ciorapi medicali de compresie de la BELSANA – confectionați conform măsurătorilor dvs. individuale. Pentru ca terapia de compresie să fie eficientă pe termen lung, vă recomandăm să consultați din nou medicul după șase luni. Dacă este necesar din punct de vedere medical, acesta vă poate elibera o nouă rețetă. Vă rugăm să prezentați acest certificat pentru ciorapi la următoarea comandă.

Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi!

## Certificat pentru ciorapi

Produsul dvs. personalizat este aici!



Etichetă cu instrucțiuni pentru spălarea la mașină

### Spălați corect ciorapii de compresie

Spălați BELSANA impuls pe partea dreaptă, respectiv spălați BELSANA classic extra pe partea stângă și folosiți balsam de rufe!

- Ciclu de spălare pentru rufe delicate
- Nu utilizați înălbitori
- Uscați cu grijă
- Nu călcăti
- Nu curățați chimic



BELSANA

### Spălarea

- adecvată pentru folosirea imediată
- recomandare: spălați ciorapii înainte de prima purtare
- spălare zilnică (max. 40°C), la mână sau la programul delicat de spălare al mașinii
- separat cu detergent delicat (de ex., detergent BELSANA blau40™), nu folosiți balsam de rufe
- clătiți riguroz, centrifugați delicat, dar nu stoarcetiți
- uscați la aer pe un prosop sau la programul delicat al uscătorului, nu călcăti niciodată și nu uscați pe calorifer sau la soare

### Compoziția materialului

Se utilizează poliamidă (Polyamid), elastan (Elastan) și, pentru unele produse, bumbac (Baumwolle) sau lână merinos (Merinowolle). Pe eticheta textilă cusută pe ciorapul dvs. se află toate datele concrete.

### Întreținerea

- a se păstra la loc uscat, ideal în ambalajul original, protejați de lumina directă a soarelui și de căldură
- Evitați contactul ciorapilor cu benzii adezive acoperite cu silicon cu solventi, unguri, creme și lotiuni hidratante de spălare, deoarece aderența poate fi afectată permanent
- acordați atenție îngrijirii regulate a picioarelor și încălțămintei corespunzătoare
- scănoșarea reprezintă un proces normal în cazul textilelor și nu reprezintă un motiv de reclamație
- nu reparati niciodată singuri daunele produse ciorapilor, ci aduceți-i înapoi la distribuitorul de la care au fost cumpărați ciorapii

### Scopul propus

Ciorapii compresivi sunt utilizati în tratamentul afecțiunilor flebologice și limfologice ale brațelor și picioarelor, precum și în cazul lipedemelor. În funcție de indicațiile medicului, se vor folosi produse diferite.

### Indicații importante

- purtați ciorapii de compresie numai după consultația unui medic
- purtarea zilnică și controale regulate asigură succesul tratamentului
- personalul instruit din punct de vedere medical trebuie să ofere indicații și recomandări cu privire la modul corect de purtare
- în caz de dureri acute ale piciorului sau reacții cutanate, vă rugăm să consultați imediat medicul
- deplasarea ușoară regulată a benzii adezive poate preveni iritația pielii
- dacă întâmpinați probleme legate de calitate sau aveți reclamații, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat

### Efectele ciorapilor compresivi medicinali

În urma utilizării produselor conform indicațiilor și datorită presiunii controlate exercitate, întoarcerea săngelui este accelerată, microcirculația din țesuturi este îmbunătățită, iar fluxul lимfatic este sporit.

Rev. 1/04/21

Pentru farmaci: Datele ciorapilor pentru arhive



D-96052 Bamberg  
Lahnanger 20  
Ofa Bamberg GmbH

Wasserrichtslst. 20 · A-5020 Salzburg  
Lahnanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de  
BELSANA Medizinische Frotzgumisse

BELSANA

obișnuită de notificare

Conform prevederilor legale, pacientii și

reghemantul produsului locală.

emiliajă produsul în conformitate cu

reglementările locale.

emiliajă produsul în conformitate cu

reglementările locale.