

## Çorap Kimlik Kartı

Kişisel ölçülerinize göre üretilen yeni BELSANA tıbbi kompresyon çorabınız kullanımınıza sunulmuştur. Uzun süreli etkili kompresyon terapisi için altı ay sonra doktorunuzla tekrar iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Tıbbi ihtiyaç durumunda doktorunuz size yeni bir reçete verebilir. Lütfen yeniden sipariş vermek için bu çorap kartını yanınızda getirin. Size önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyarız!

## Çorap Kimlik Kartı

## Size özel ürününüz burada!



### Çamaşır makinesi talimatları

## Kompresyon çoraplarını doğru şekilde yıkayın

### Lütfen ters çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

Hassas ayarda yıkayın

Ağartıcı kullanmayın

Nazikçe kurutun

Ütülemeyin

Kuru temizleme yapmayın



# BELSANA

# BELSANA

İleride bize sipariş verirken işlemleri kolaylaştırmak ve basitleştirmek amacıyla sol tarafta size ait **Kişisel Çorap Bilgi Kartını** bulacaksınız. Bu kart size ait tüm temel bilgilerini içermektedir. Yapmanız gereken koparmak, yapıştırmak ve güvenli bir yerde saklamaktır.

Saygılarımızla  
**BELSANA ekibiniz**

### Yıkama

- Hemen kullanıma uygundur
- Tavsiye: İlk kullanımdan önce yıkayın
- Her gün (maks. 40°C) elle veya makinenin hassas ayarında yıkayın
- Hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin „BELSANA blau40 deterjan“), yumuşatıcı kullanmadan ayrı olarak yıkayın
- İyice durulayın, makinede yavaş hızda sıkın, elle büyükerek sıkmayın.
- Bir havlu üzerinde havayla veya kurutucunuzun hassas ayarında kurutun, asla ütülemeyin ve ısıtıcının üzerine koymayın veya güneşte kurutmayın

### Malzeme bileşimi

Polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazı ürünlerde pamuk (Baumwolle). Spesifik bilgiler, çorabınıza dikilmiş tekstil etiketinde mevcuttur.

### Bakım

- Kuru bir şekilde ve mümkünse orijinal ambalajında, güneşten ve ısıdan koruyarak saklamanızı tavsiye ederiz
- Silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar; çözücüler, merhemler, kremler ve nemlendirici yıkama losyonları ile temas etmemelidir. Aksi takdirde yapışkan bantların yapışma özelliği kalıcı olarak bozulabilir
- Düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakkabılar giymeye dikkat edin
- Lif topakları (pilling) tekstilde normal bir süreçtir ve şikayet nedeni olabilecek bir durum değildir
- Çoraplardaki hasarları kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız tıbbi ürün satıcısına geri götürün

### Kullanım amacı

Kompresyon çorapları, kol ve bacaklardaki flebolojik ve lenfolojik hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir.

### ⚠️ Önemli bilgiler

- Kompresyon çoraplarını sadece doktorunuza danıştıktan sonra kullanın
- Her gün giyme ve düzenli kontrol muayeneleri, tedavinin başarılı olmasını sağlar
- Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmeli ve çorapları nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiyede bulunmalıdır
- Akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın
- Yapışkan bandın düzenli olarak hafifçe hareket ettirilmesi cildin tahriş olmasını önleyebilir
- Kalite sorunları ve şikayetler için lütfen tıbbi ürün satıcısıyla iletişime geçin

### Tıbbi kompresyon çoraplarının etkisi

İlgili endikasyona göre uyarlanmış ürünlerle ve kontrollü basınçla kan akışı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon iyileştirilir ve lenf akışı artırılır.

# BELSANA

**BELSANA Medizinische Erzeugnisse**  
Zweigniederlassung der Ora Bamberg GmbH  
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de  
Wasserföhrstr. 20 · A-5020 Salzburg

**Ora Bamberg GmbH**  
Laubanger 20  
D-96052 Bamberg

Rev. 1/04/21

Uzman bayi için: arşivinizdeki çorap bilgileri



## Ayaktarınızın üzerinde sağlıklı kalabilmeniz için hep beraber sağlıyoruz!


Örneğin özel üretilmiş BELSANA çorabınız, tıbbi kompresyon çorapları (RAL-GZ 387/1) için dünya çapındaki en sıkı kalite ve test düzenlemelerine uygundur ve güvenli malzeme ve boyaların kullanılmasını şart koşan Öko-Tex Standard 100'ü karşılar.

Size özel BELSANA Bamberg ürününü geliştirirken, yılların araştırma ve geliştirilmesinin sonucu olan bir ürünü kullanmaktasınız. Özenli üretim ve yüksek kalite, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak denetlenir ve elde edilir. Sorumlu ve bilingi üretim yöntemlerimiz, bağımsız test kuruluşlarının verdiği sertifikarla belgelendirilir.


**BELSANA'dan**

## En üstün kalite


Pratik talimatlarımızı izleyerek çoraplarınızı giymek çok kolaydır.

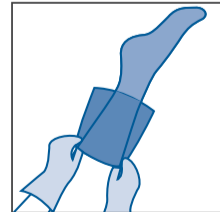

1. Çorabı ayak kısmına kadar iç tarafa çevirin. Çorabın ayak kısmını önce parmaklarınıza sonra ayak üstüne geçirin.

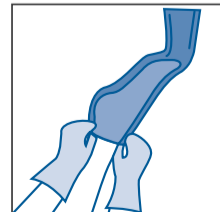

2. Çorabın bacak kısmını dikkatlice topuğunuza dan geçirin. Bunu yaparken çorabı ucundan veya yapışkan kenardan çekmemeye özen gösterin.

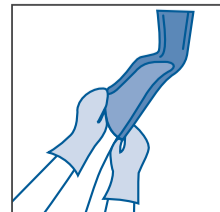

3. Şimdi çorabın geri kalan kısmını düzenli şekilde ve esnetmeden ellerinizle yukarı çekin. Çorap kirli şekilde oturuncaya kadar ellerinizle düzeltin.

### Bildirim zorunluluğu

Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuç veya ölümüne yol açan ya da yol açabilecek, tıbbi ürünle ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu kuruluşlara (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekte yükümlüdür.

### Bertaraf etme

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü biyogenizdeki yöntemlere uygun olarak bertaraf edin.

### Garanti

Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. Kullanım süresi, düzenli kullanımı ve uygun bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usullere aykırı kullanımı nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sorundan sorumlu olan değişiklikler de usullere aykırı kullanımı kabul edilmez.

### Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- Kronik poliartrit
- Kronik mellitus
- İleri periferik nropati (örneğin diabetes)
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İnfolerans
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları

### Mutlak kontrendikasyonlar

- İleri periferik arter hastalığı
- Dekompans kalp yetersizliği
- Septik flebit
- Phlegmasia coerulea dolens

### Bağıli kontrendikasyonlar

- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İnfolerans
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları

### Riskler ve yan etkiler

- Ölçüde cilt bakımı yapılırsa tavsiye edilir.
- Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli dikkat gösterilmelidir.

### Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- Kronik poliartrit
- Kronik mellitus
- İleri periferik nropati (örneğin diabetes)
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İnfolerans
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları