




1. قلب المعصم من الداخل إلى الخارج وسحبه على اليد
اقلب معصم الذراع من الداخل إلى الخارج حتى
منتصفه من الأعلى. استخدم قفاز الإمساك Star
المطاطي من BELSANA لارتداء المعصم
والآن اسحب المعصم على اليد.

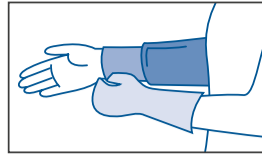


2. ارتداء بقية المعصم
اسحب بقية المعصم بعناية وبالتساوي على
ذراعك وحتى الإبط. تجنب سحب المعصم لأعلى
الذراع بربط الشريط أو شده بشكل مبالغ.

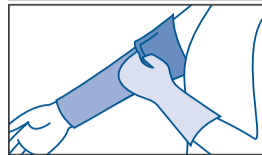

3. الفرد بالتساوي
والآن عليك فرد المعصم بالتساوي على ذراعك
لتتخلص من أي طيّات.

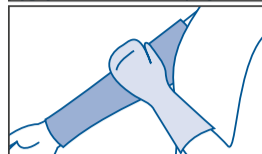

4. ملاءمة خالية من الطيّات
يعتبر التخلص من أي طيّات أمرًا حيويًا لتجنب احتناك الذراع.

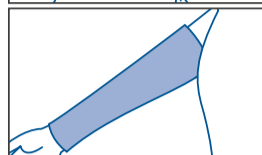

إن ارتداء الجورب أمر سهل باتباع إرشاداتنا العملية.

للبرشة. في حالة ظهور الأعراض التالية، يرجى خلع الجوارب
على الفور والتحدث مع الطبيب حول استمرار العلاج:
تلون أصابع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير
طبيعية وشعور بتميل، آلام متزايدة، ضيق في التنفس
وتعرق، تقيد حاد في الحركة.

الضمان

مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة بـ 3 سنوات
إذا تم تخزينها بشكل صحيح. يضاف إلى تلك المدة وقت
الارتداء، وهو 6 أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم
والعناية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد
المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا
يعد ساريًا في الحالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور
نتيجة عن التآكل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل
الاستخدام غير السليم أيضًا التغييرات اللاحقة على المنتج
التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. لا تعتبر
الانحرافات اللونية الطفيفة، التي قد تنشأ بسبب عملية
الصباغة الفردية، عيبًا. وبالتالي يتم استبعاد السلع المقابلة
من التبادلات والعوائد. المنتج مخصص لعلاج مريض واحد
فقط. إذا تم نقله إلى أشخاص آخرين لإعادة استخدامه،
فسوف تنتفي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج.

التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام الافتراضي، يرجى التخلص من
المنتج وفقًا للوائح المحلية.

ضرورة التبليغ

بموجب اللوائح القانونية، يتعين على المرضى والمستخدمين
إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا،
المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية "BfArM") على
الفور بالحوادث الخطيرة التي حدثت ارتباطًا بالمنتج، والتي
أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية
أو الوفاة.

- التهاب جلدي في الساقين
- مشاكل الغثيان والدوار والاحتقان أثناء الحمل
- الحالة بعد الحروق
- علاج الندبات

موانع الاستعمال: موانع الاستعمال النهائية:

- مرض انسداد الشرايين المحيطية المتقدم (عند تطبيق أحد
هذه المعايير: >0.5 (ABPI)، أو الضغط الشرياني الكاحلي
> 60 مم زئبق، أو ضغط إصبع القدم > 30 مم زئبق أو
TCPo2 > 20 مم زئبق قوس القدم)
- قصور القلب للأعضاء
- التهاب الوريد الإتنائي
- الالتهاب الوريدي المُزرق المؤلم

المخاطر التي يجب وضعها في الاعتبار (يستند القرار العلاجي إلى تقييم الفوائد/المخاطر):

- الالتهاب الجلدي النازّ
- عدم تحمل مواد الجورب الضاغطة
- عدم تحمل مواد ال مكونات الجوارب الضاغطة
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- اعتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل داء
السكري)
- التهاب المفاصل المزمن

سيتم رفض تحمل أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع موانع الاستعمال هذه.

⚠️ أي بن ارجل ا راث آل اورطاج مر ل

يمكن أن تسبب الجوارب الطبية الضاغطة نخزًا في الجلد،
وتلثًا بالأعصاب الطرفية ناجمًا عن الضغط. يمكن أن تسبب
ارتداء الجوارب الضاغطة مع البرشة الحساسة في حدوث
حكة ومشاكل جلدية. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة

جودة متميزة

ن م BELSANA

مع هذا المنتج المخصص لك من
BELSANA Bamberg، فإنك بذلك ترثدي نتاج
سنوات عديدة من البحث والتطوير. نضمن لك دقة
الصناعة ومستوى عاليًا من الجودة، ونتحكمر فيهما
باستخدام أحدث التقنيات. وتوثق الشهادات
المنتظمة من مؤسسات الاختبار المستقلة تعاملنا
المسؤول مع منتجاتنا.

يتوافق منتج BELSANA الخاص بك مع معيار
OEKO-TEX® 100، الذي ينص على استخدام مواد
وأصباغ غير ضارة.

معاً يمكننا ضمان الحفاظ على صحتك!

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



فيما يخص منتج التجزئة المتخصصة: تخزين البيانات في السجل الخاص بك



تحت إشراف وزارة الصحة الألمانية
في 05.01.2024
www.oeko-tex.com
STANDARD
100
TEKO
95.0.1594
HAMBURG
HTL

تحت إشراف وزارة الصحة الألمانية
في 05.01.2024
www.oeko-tex.com
STANDARD
100
TEKO
95.0.1594
HAMBURG
HTL

تحت إشراف وزارة الصحة الألمانية
في 05.01.2024
www.oeko-tex.com
STANDARD
100
TEKO
95.0.1594
HAMBURG
HTL

BELSANA

تحت إشراف وزارة الصحة الألمانية
في 05.01.2024
www.oeko-tex.com
STANDARD
100
TEKO
95.0.1594
HAMBURG
HTL

made-to-measure

MADE FOR YOU
INDIVIDUALLY

handed over by

B.

انصافه اليعرفيقه
الخزرن

تحت إشراف وزارة الصحة الألمانية
في 05.01.2024
www.oeko-tex.com
STANDARD
100
TEKO
95.0.1594
HAMBURG
HTL