

Waschmittel ideal zur Pflege von elastischen Strümpfen wie z. B. medizinischen Kompressionsstrümpfen

- hochkonzentriert
- schonend und pflegend

Allgemeine Pflegehinweise



Schonwaschgang



Auf links waschen



Keinen Weichspüler verwenden!



Gut ausspülen, nicht schleudern oder wringen – nur leicht ausdrücken



Schonend trocknen – im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur



Nicht bügeln, chemisch reinigen oder bleichen



Achtung!

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kontakt mit Augen vermeiden. Verursacht schwere Augenreizung.
- Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen und Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nach dem Öffnen innerhalb von 24 Monaten verbrauchen.

Wasch- und Dosierungsanleitung

Handwäsche:

Auf 1 Liter lauwarmes Wasser (max. 40° C) 1 Pumpstoß BELSANA blau40 geben und die Strümpfe darin durchwaschen. Zuletzt mit klarem Wasser ausspülen. Strümpfe nicht wringen!

Maschinenwäsche:

Je nach Beladung und Wasserhärte 5-10 Pumpstöße BELSANA blau40 in das Waschmittelfach der Maschine geben. Strümpfe im Wäschenetz mit ähnlichen Farben bei maximal 40° C im Schonprogramm waschen.

Bei Flecken oder starken Verschmutzungen:

Verschmutzte Stellen mit BELSANA blau40 anfeuchten, sanft verreiben, einige Minuten einwirken lassen, dann wie oben beschrieben per Hand oder in der Maschine waschen.

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
T 0951 309303-0 · F 0951 309303-450
service@belsana.de · www.belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
T +43 662 450229 · F +43 662 451196
service@belsana.at

Inhaltstoffe (gemäß Detergenzien-Verordnung): Aqua, 5-15 % anionische Tenside, < 5 % 2-Bromo-2-Nitropopane-1,3-Diol

