

Fiche personnelle

Vous venez de recevoir votre nouveau collant de contention médical fabriqué sur mesure de la part de BELSANA. Pour une thérapie de compression efficace et durable, nous vous recommandons de consulter de nouveau votre médecin dans six mois. En cas de nécessité médicale, il pourra vous délivrer une nouvelle ordonnance. Pour toute commande supplémentaire, veuillez vous munir de ce certificat.

Nous serons ravis de vous conseiller !

Fiche personnelle

Votre sur-mesure est arrivé!

Pour faciliter votre prochaine commande, vous trouverez ci-joint **votre fiche personnelle** avec toutes les informations nécessaires. A détacher, plier et bien conserver.

Avec tous nos compliments
 Votre équipe BELSANA

BELSANA



Aide-mémoire à afficher à votre machine à laver

Conseils d'entretien

Veuillez laver à l'envers et ne pas utiliser d'assouplissant !

Lavage délicat

Pas d'agent blanchissant

Séchage délicat

Pas de repassage

Pas de nettoyage à sec



BELSANA

Lavage

- Convient à une utilisation immédiate.
- Recommandation : laver le produit avant la première utilisation.
- Lavage quotidien (maximum 40 °C) à la main ou en utilisant le programme lavage délicat de la machine.
- Laver le produit séparément avec une lessive pour textiles délicats (p. ex., la lessive BELSANA blau40) et ne pas utiliser d'adoucissant.
- rincer abondamment, ne pas essorer et ne pas tordre.
- Faire sécher le produit à l'air libre sur une serviette ou utiliser le programme pour textiles délicats de votre sèche-linge. Ne jamais repasser et ne pas faire sécher sur un radiateur ou au soleil.

Composition de la matière

Les bas de contention sont composés de polyamide (Polyamid), d'élasthanne (Elastan) et, pour certains, de coton (Baumwolle). Vous trouverez les indications concrètes sur l'étiquette cousue dans vos bas.

Entretien

- Stocker le produit dans un environnement sec et à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur, de préférence dans son emballage d'origine.
- Les bas avec bandes adhésives recouvertes de silicone ne doivent pas être mis en contact avec des solvants, des pommades, des crèmes, ni des lotions nettoyantes nourrissantes, car leur adhérence peut s'en trouver durablement détériorée.
- Veiller à ce que vos pieds soient bien entretenus et à ce que vos chaussures soient dans un état irréprochable.
- Les bouloches sont un phénomène normal des matières textiles et ne constituent pas un motif de réclamation.
- Ne jamais réparer les détériorations des bas soi-même, mais les rapporter au détaillant chez qui ils ont été achetés.

Usage prévu

Les bas de contention s'utilisent pour le traitement de maladies phlébologiques et lymphologiques des bras et des jambes ainsi qu'en cas de lipœdèmes. En fonction de l'indication, on utilise différents produits.

Remarques importantes

- Ne porter les bas de contention qu'après avis médical.
- Le port quotidien des bas et les examens de contrôle réguliers garantissent le succès du traitement.
- Seul un personnel médical professionnel formé peut délivrer les bas et fournir des conseils sur la bonne manière de les porter.
- En cas de douleurs aiguës ou de réactions cutanées, consulter immédiatement un médecin.
- Un léger ajustement régulier de la bande adhésive peut prévenir les irritations cutanées.
- En cas de problème qualité ou de réclamation, contacter le détaillant.

Action des bas de contention médicaux

Du fait des produits adaptés à chaque indication et du contrôle de la pression, le retour sanguin est accéléré, la microcirculation est améliorée dans les tissus et le flux lymphatique augmente.

Rev. 1/04/21

Pour la pharmacie: données du bas à conserver



BELSANA
 Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
 Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
 Wasserrfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
 Ofa Bamberg GmbH
 Laubanger 20
 D-96052 Bamberg

Obligation de déclaration
 En raison de réglementations légales, les patients et utilisateurs sont obligés de communiquer immédiatement au fabricant (BfM en Allemagne) tout fait grave ayant pu entraîner la mort ou une aggravation significative de l'état de santé.

Elimination
 À l'issue de la durée d'utilisation, veuillez éliminer le produit selon les réglementations locales.

Risques et effets secondaires
 En cas de peau sensible, des démangeaisons et des problèmes de peau peuvent survenir sous les bas de contention. C'est pourquoi il est recommandé de prodiguer des soins cutanés adéquats. Si les symptômes suivants apparaissent, retirez immédiatement les bas et discutez de la poursuite du traitement avec votre médecin: coloration bleue ou blanche des orteils, paies-thésies et sensations d'engourdissement, douleurs croissantes, essoufflement et sueurs, limitations aiguës de la mobilité.

Aucune responsabilité ne saurait être engagée de notre part en cas de non-respect de ces contre-indications.

Contre-indications absolues
 Artériopathie périphérique avancée
 Insuffisance cardiaque décompensée
 Phlébite septique
 Phlébite bleue

Contre-indications relatives
 Dermatose surinfectée
 Intolérances aux matériaux des bas de contention
 Graves troubles sensoriels des extrémités (ex. diabète sucré)
 Neuropathie périphérique avancée
 Polyarthrite chronique

Ainsi avec ces conseils pratiques, l'enfilage du bas est bien plus facile.

La qualité haut
 Votre sur-mesure de Belsana est le résultat d'un programme de recherche performant et d'une longue expérience. Grâce à une technique de fabrication innovante et une main d'œuvre minutieuse, Belsana vous assure une qualité constante haut de gamme. Des contrôles réguliers par des institute indépendants prouvent notre engagement envers nos produits.

Votre produit BELSANA sur mesure est notamment conforme aux normes de qualité et d'examen les plus strictes au monde applicables pour les bas de contention médicaux (RAL-GZ 387/1) ainsi qu'au Standard 100 Oeko-Tex, qui impose l'utilisation de matériaux et de colorants ne présentant aucun danger.

Ensemble, nous prenons soin de vos jambes!

Indications
 (pour obtenir la liste complète, se reporter à la directive AWMF 037/005, version 12/18).
 Amélioration des symptômes veineux et de la qualité de vie en cas de maladies veineuses chroniques
 Prévention et traitement de l'œdème veineux cutanés
 Prévention et traitement des atteintes Dermatopolysclérose et atrophie blanche
 Traitement des ulcères veineux et artériels (se reporter à la section Contre-indications)
 Veines variqueuses
 Phases initiale après traitement des varices
 Insuffisance veineuse fonctionnelle
 Malformations veineuses
 Thrombose veineuse
 État après thrombose
 Syndrome post-thrombotique
 Propylaxie de la thrombose sur patients mobiles
 Lymphœdème
 Œdème au cours de la grossesse
 Lipœdème à partir du stade II
 États congestifs par suite d'immobilité (syndrome congestif arthrognone, parésies et parésies partielles des extrémités)
 Adiposité avec insuffisance veineuse fonctionnelle
 Dermatoses inflammatoires des jambes (Nausées, vertiges et douleurs congestives au cours de la grossesse
 État après inflammations
 Traitement des cicatrices

Garantie
 La durée de conservation des bas médicaux de contention est limitée à 3 ans dans des conditions de stockage correctes. À cela s'ajoute la durée de port qui se monte au maximum à 6 mois en cas d'utilisation régulière et de soins adéquats. À expiration de ce délai, les produits sont exclus de toute garantie. Sont fondamentalement exclus de la garantie les dysfonctionnements résultant d'une utilisation inadéquate. Réserve de l'utilisation inadéquate.


Contre-indications relatives
 Dermatose surinfectée
 Intolérances aux matériaux des bas de contention
 Graves troubles sensoriels des extrémités (ex. diabète sucré)
 Neuropathie périphérique avancée
 Polyarthrite chronique

Aucune responsabilité ne saurait être engagée de notre part en cas de non-respect de ces contre-indications.

Risques et effets secondaires
 En cas de peau sensible, des démangeaisons et des problèmes de peau peuvent survenir sous les bas de contention. C'est pourquoi il est recommandé de prodiguer des soins cutanés adéquats. Si les symptômes suivants apparaissent, retirez immédiatement les bas et discutez de la poursuite du traitement avec votre médecin: coloration bleue ou blanche des orteils, paies-thésies et sensations d'engourdissement, douleurs croissantes, essoufflement et sueurs, limitations aiguës de la mobilité.


Obligation de déclaration
 En raison de réglementations légales, les patients et utilisateurs sont obligés de communiquer immédiatement au fabricant (BfM en Allemagne) tout fait grave ayant pu entraîner la mort ou une aggravation significative de l'état de santé.

Elimination
 À l'issue de la durée d'utilisation, veuillez éliminer le produit selon les réglementations locales.

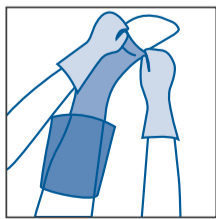


Instructions pour l'enfilage du bas à pointe ouverte


1. L'enfilage de vos bas de compression médicale sera plus facile avec l'utilisation de l'enfilé bas de BELSANA. Faites glisser votre pied dans l'enfilé-bas jusqu'au talon.

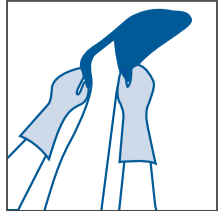


2. Ensuite enflevez votre bas jusqu'à ce qu'il soit bien placé au talon. Avec l'enfilé-bas de BELSANA cela sera plus facile.

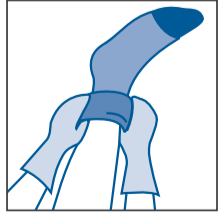

3. Pour enlever l'enfilé-bas, retournez la bordure du pied.

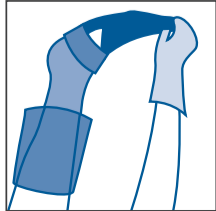

4. Puis enlevez l'enfilé-bas en le tirant par son bout pointu.

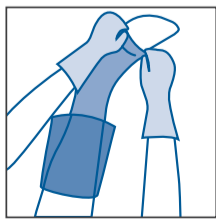

5. Ensuite remettez la bordure du pied bien en place. Enfin répartissez votre bas harmonieusement sur la jambe avec précaution. Evitez de tirer et ajustez le bas de façon uniforme à ce que tous les plis disparaissent.