

Karta zaopatrzenia w pończochy

Właśnie otrzymali Państwo swoje nowe medyczne rajstopy uciskowe firmy BELSANA- wyprodukowane według indywidualnych wymiarów. Aby terapia uciskowa była trwale skuteczna, zalecamy po sześciu miesiącach ponowną konsultację z lekarzem. Jeśli jest to konieczne z medycznego punktu widzenia, może on wystawić nową receptę. W celu ponownego zamówienia należy przynieść ze sobą tę kartę pończoch.

Chętnie Państwu doradzimy!

Karta zaopatrzenia w pończochy

Państwa produkt na zamówienie!

Aby ułatwić i uprościć Państwu ponowne zamówienie przy okazji następnej recepty, po lewej stronie znajdują Państwo **swój osobistą kartę zaopatrzenia w rajstopy** ze wszystkimi istotnymi informacjami. Wystarczy je odkleić, skleić i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Z najlepszymi rekomendacjami
Państwa zespół BELSANA

BELSANA



Informacje dot. prania

Prawidłowe pranie pończoch uciskowych

Prac po wywróceniu na lewą stronę. Nie używać płynu do płukania!

Cykl prania do tkanin delikatnych

Nie stosować wybielaczy

Suszenie jak w przypadku tkanin delikatnych

Nie prasować

Nie czyścić chemicznie



BELSANA

Pranie

- produkt nadaje się do użycia natychmiast po rozpakowaniu
- Zalecenie: wyprać przed pierwszym założeniem
- pranie codzienne (maks. 40°C), ręczne lub w pralce w cyklu delikatnym
- oddzielnie z zastosowaniem łagodnych środków piorących (np. BELSANA blau40°), nie stosować płynu do płukania tkanin
- dobrze wyplukać, delikatnie odwirować, ale nie wyżywać
- suszyć na ręczniku na powietrzu lub w suszarce w cyklu delikatnym, nigdy nie prasować i nie suszyć na grzejniku ani na słońcu

Skład materiałowy

Stosowane materiały to poliamid (Polyamid), elastan (Elastan), a w przypadku niektórych produktów bawełna (Baumwolle).
Konkretne informacje na ten temat są podane na etykiecie wszytej w pończochę.

Pielęgnacja

- przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepła
- Pończochy z taśmą przylepną pokrytą silikonem nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami, maściami, kremami i balsamami do mycia, ponieważ może to trwale pogorszyć ich właściwości przylepne
- należy upewnić się, że stopy są regularnie pielęgnowane, a buty są w doskonałym stanie
- Zmęczenie włókna (pilling) jest normalnym procesem zachodzącym w tekstyliach i nie stanowi powodu do reklamacji
- Nigdy nie naprawiaj uszkodzeń pończoch samodzielnie, lecz zwróć je do sprzedawcy, u którego pończocha została zakupiona

Przeznaczenie

Pończochy uciskowe są stosowane w terapii schorzeń układu żylnego i limfatycznego w obrębie ramion i nóg, a także w przypadku obrzęków tłuszczowych. Zależnie od wskazania mogą być stosowane różnego typu produkty.

Ważne wskazówki

- Pończochy uciskowe należy nosić tylko po konsultacji z lekarzem
- codzienne noszenie i regularne kontrole zapewniają pozytywny wynik leczenia
- Wydawanie i porady dotyczące prawidłowego sposobu zakładania pończoch muszą być udzielane przez przeszkolony w zakresie medycznym personel
- w przypadku wystąpienia ostrego bólu nóg lub reakcji skórnych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
- regularne, niewielkie przesunięcia taśmy samoprzylepnej mogą zapobiec podrażnieniu skóry
- w przypadku problemów z jakością i reklamacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą

Działanie medycznych pończoch uciskowych

Poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych produktów i kontrolowanie ucisku przyspieszony zostaje przepływ krwi żyłnej, poprawia się mikrokrążenie w tkankach i zwiększa się przepływ limfy.

Rev. 1/04/21

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

dla apteki: Dane dot. pończoch do archiwizacji!



Wskazania
(patrz również wytyczne terapii uciskowej — Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie AWMF 037/005, wydanie 12/18)
• Leczenie objawów żylnych i poprawa jakości życia w przewlekłych chorobach układu żylnego
• Profilaktyka i leczenie obrzęków żylnych
• Egzema i zaburzenia pigmentacji
• Dermatoabliskeroza i zanik biały (atrophia alba)
• Leczenie i usmierzanie bólu w przypadku owrzodzeń żylnych nóg (ulcus cruris venosus), a także zapobieganie nawrotom choroby
• Leczenie owrzodzeń nóg pochodzenia tętniczko-żylnego (patrz przeciwwskazania)
• Złakci kończyn dolnych
• Poczłakowa tętna po leczeniu żyłaków
• Czynoścowa niewydolność układu żylnego
• Malformacje żyłne
• Zakrzepica żylna
• Stany po zakrzepicy
• Zespół pozakrzepowy
• Profilaktyka zakrzepicy u pacjentów mobilnych
• Obrzęki w przebiegu ciąży
• Obrzęki powtarzowe/pooperacyjne
• Cyklizny obrzęk idiopatyczny
• Lpoodmia (obrzęk tłuszczowy) od stadium II
• Stany zastoinowe spowodowane uniemożliwieniem (artrogenny zespół zastoinowy, parezy i częścione parezy kończyn)
• Obrzęki uwarunkowane lekowo, gdy nie jest stojąca i siedząca)
• Obrzęki uwarunkowane lekowo, gdy nie jest możliwe zastąpienie leków innymi

Bezwzględne przeciwwskazania
• Zaawansowana choroba tętnic obwodowych
• Dekompensacja niewydolności serca
• Ścipyne zapalenie żył
• Bolesny obrzęk śródca (phlegmasia coerulea dolens)
• Wysokowe zniżany skórne
• Nadrażliwość na materiały użyte w pończochach

Względne przeciwwskazania
• Powazne zaburzenia czucia w obrębie kończyn
• Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. w przebiegu cukrzycy)
• Przewlekłe zapalenie wielostawowe

Prac nie ponosi odpowiedzialności w razie nieprzebrzegania powyższych przeciwwskazań.
• W przypadku skóry wrażliwej stosowanie pończoch uciskowych może powodować swędzenie i problemy skórne. Zaleca się odpowiednią pielęgnację skóry. W przypadku podrażnień należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. sine lub białe zabarwienie owania terapii z lekarzem. sine lub białe zabarwienie paciców stop, uczucie dyskomfortu lub odrażenie nastające dolegliwości bólowe, spłyczenie oddechu

Obowiązek zgłaszania niebezpiecznych przypadków
Przepsy ustawowe zobowiązują pacjentów i użytkowników do niezwłocznego zgłaszania do producenta i właściwych organów krajowych (w Niemczech BfArM) wszelkich powstających zdarzeń związanych ze stosowaniem produktu, tj. zdarzeń, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci.

Gwarancja
Okres przydatności medycznych pończoch uciskowych jest ograniczony do 3 lat, pod warunkiem przechowania w odpowiednich warunkach. Dodaje się do tego czas noszenia, który wynosi maksymalnie 6 miesięcy przy regularnym użytkowaniu i odpowiedniej pielęgnacji. Po upływie tego terminu gwarancja udziela na produkt traci wartość. Zasadniczo gwarancja nie obejmuje wad, które są skutkiem normalnego zużycia lub stosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem uznaje się również samodzielnym modyfikowaniem cech produktu, bez skorzystania z pomocy producenta w tym zakresie. Produkt jest przeznaczony do stosowania w jednym pacjencie. W razie przekazania do użytku innym osobom wygasa gwarancja producenta z tytułu odpowiedzialności za produkt.




Utylizacja
Po upływie okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi zasadami.

Zagrożenia i działania niepożądane
W przypadku skóry wrażliwej stosowanie pończoch uciskowych może powodować swędzenie i problemy skórne. Zaleca się odpowiednią pielęgnację skóry. W przypadku podrażnień należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. sine lub białe zabarwienie owania terapii z lekarzem. sine lub białe zabarwienie paciców stop, uczucie dyskomfortu lub odrażenie nastające dolegliwości bólowe, spłyczenie oddechu

! Przed założeniem pończoch należy wywrócić na lewą stronę aż do stopy. Wciągnąć stopę pończochy przez palec, a następnie przez grzbiet stopy.

2. Ostrożnie wciągając górną część pończochy przez pięte. Unikać przy tym podciągania za koniec pończochy z taśmą podtrzymującą.

3. Reszta pończochy przesunąć równomiernie w głąb, nie naciskając jej. Na koniec wygładzić pończochę na nodze, aż będzie pozabwiona fałd.

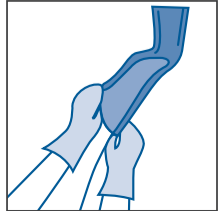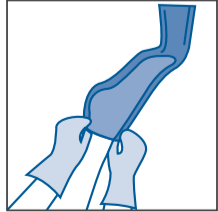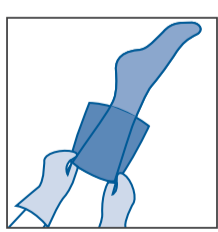

Instrukcja zakładania, zakrycie palce

! Przed założeniem pończoch należy wywrócić na lewą stronę aż do stopy. Wciągnąć stopę pończochy przez palec, a następnie przez grzbiet stopy.