

Die richtige Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben

Zur Erhaltung der Kompressionswirkung sollten Ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe regelmäßig gewaschen werden. Dies ist nicht nur aus hygienischen Gründen wichtig, sondern stellt auch die Festigkeit der durch das Tragen geweiteten Strümpfe wieder her.

Beim Waschen beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:



Für den sofortigen Gebrauch geeignet. Wir empfehlen, es vor dem ersten Tragen zu waschen. Danach bitte täglich waschen.



Strümpfe trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen, möglichst in der Originalverpackung.



Nur auf links waschen und trocknen. (Ausgenommen BELSANA impuls – auf rechts waschen.)



BELSANA Kompressionsstrümpfe und insbesondere silikonbeschichtete Haftbänder sollten niemals mit Lösungsmitteln, stark fettenden Salben oder rückfettenden Lotionen und Cremes in Berührung kommen. Benutzen Sie zur Hautpflege Callusan Cremeschäume, die schnell und rückstandslos einziehen und mit Ihren Strümpfen absolut verträglich sind.



Schonwaschgang, Wassertemperatur bis maximal 40° C.

**clean
Star40**

Waschen Sie die Strümpfe separat mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler (z.B. BELSANA cleanStar40 Waschmittel).



Keinen Weichspüler verwenden.



Schmuck und lange Fingernägel können den Strumpf beschädigen. Achten Sie bitte auch auf regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk.



Nicht bleichen.



Faserknötchen (Pilling), die sich durch Reibung an anderen Kleidungsstücken bilden können, mindern die Qualität des Strumpfes nicht und sind kein Reklamationsgrund.



Gut ausspülen, nicht schleudern oder wringen – nur leicht ausdrücken.



Reparieren Sie Schäden nicht selbst, sondern bringen Sie den Strumpf zu der Apotheke zurück, bei der er gekauft wurde.



Strümpfe an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners trocknen, aber nicht auf die Heizung oder in direktes Sonnenlicht legen!



Niemals bügeln.



Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.



Nicht chemisch reinigen.



Weitere Wasch- und Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung, die Strumpfverpackung beiliegt.

**Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Ihre BELSANA Apotheke**