


**BELSANA hafti** ist eine spezielle wasserlösliche Klebelotion für die Befestigung von medizinischen Kompressionsversorgungen an Armen und Beinen.

**Anwendung: 1.** Strumpf wie gewohnt anziehen bis er optimal sitzt. **2a. Ohne Haftband:** Oberrand nach außen umschlagen, BELSANA hafti rundum auf die freigelegte Haut auftragen. **2b. Mit Haftband:** Haftband plus ca. 3-5 cm Strumpf nach außen umschlagen und BELSANA hafti rundum unterhalb der späteren Haftbandposition auf die Haut auftragen. **Die Beschichtung des Haftbands darf nicht mit der Klebelotion in Berührung kommen!**

**3.** Oberrand/Haftband zurückschlagen und fest an die Haut andrücken, fertig! Die Flasche sofort nach Gebrauch wieder dicht verschließen. **Bebilderte Anwendungshinweise auf der Innenseite dieses Etiketts.**

**Haltbarkeit, Gewährleistung, Transport und Lagerung, Entsorgung:** Bitte schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Wir empfehlen die Aufbewahrung bei Raumtemperatur. Das Produkt sollte stets gut verschlossen, stehend gelagert und transportiert werden.

 Weitere Hinweise auf der Innenseite des Etiketts beachten. Bei Unfall oder Unwohlsein erhalten Sie 24 h unter der Giftnotrufnummer +49 761 19240 Auskunft.

# BELSANA

# hafti

## Extra starker Halt, sanft auf der Haut

### Für medizinische Kompressionsstrümpfe und kompressive Strümpfe



**Gefahr.** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Enthält: Isopropylalkohol.

**Inhaltsstoffe:** Isopropylalkohol, Water, PVP, Glycerin, Parfum, Geraniol, Limonene, Coumarin, Linalool, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

**60ml e**  

 30/10/2027  LOT 24-000187  REF 299811  
 UDI 111017820745  UFI Q361-T0XV-R00P-K675  
PZN 10178207 Rev. 6/09/24


 **BELSANA Medizinische Erzeugnisse**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg  
Tel. +49 951 309 303-0 · service@belsana.de

 **Ultrana GmbH**  
Mackstraße 112 · D-88348 Bad Saulgau  
Tel. +49 7581 2007 298 · info@ultrana.de



**Anwendung:** Vor der Anwendung muss die Haut trocken und sauber sein, alte Klebereste von einer vorherigen Anwendung sollten von Arm und Bein sowie von dem Kompressionsstrumpf entfernt werden. Ziehen Sie die medizinische Kompressionsversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers an. Legen Sie den Rand nach unten um und tragen Sie die Klebelotion mit der Roll-on Kugel auf die freigelegte Haut auf (nicht auf den Strumpf – A und C). Ein einmaliges Auftragen der Klebelotion rund um den Arm oder das Bein herum ist ausreichend.

Klappen Sie anschließend den Strumpfrand wieder hoch und drücken Sie ihn an die Haut an. Bei Strümpfen mit einem Silikonrand sollte die Klebelotion nicht direkt unter diesem aufgetragen werden. Bei flachgestrickten Kompressionsversorgungen sollte die Klebelotion in zwei Längsstreifen (senkrecht, beidseitig) auf die Haut aufgetragen werden (B und D).

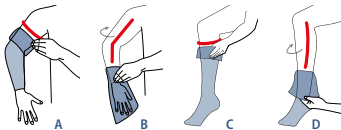

**Anwendungsdauer:** Die Klebelotion ist für den täglichen Gebrauch geeignet.

### **Reinigungshinweise:**

Reste der Klebelotion lassen sich mit Wasser mühelos von der Haut oder dem Strumpf abwaschen. Zusätzliche Reiniger oder Desinfektionstücher sind nicht erforderlich. Entfernen Sie Klebereste von der Haut nach dem Ausziehen des Kompressionsstrumpfes. Waschen Sie die Kompressionsversorgung gemäß den Vorgaben des Herstellers.

**BELSANA hafti** ist wasserlöslich, enthält keine Farbstoffe und hinterlässt keine Flecken.

**Besondere Hinweise:** Zum Ausziehen kann der Kompressionsstrumpf an den Klebestellen vorab mit einem nassen Lappen angefeuchtet werden. Dadurch löst sich der Kleber und erleichtert das Ausziehen. Schweiß, andere Flüssigkeiten, Hautpflegeprodukte oder Wasseraktivitäten können zu einem Verlust der Haftkraft des Klebers führen, so dass **BELSANA hafti** möglicherweise erneut aufgetragen werden muss. Die Klebelotion ist nicht für die Klebeverbindung zwischen zwei oder mehr Kompressionsversorgungen konzipiert.

### **Gegenanzeigen:**

- Entzündete oder nässende Hauterkrankungen (inkl. Neurodermitis)
- Offene Wunden
- Unverträglichkeit auf Inhaltsstoffe

Nicht in Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (Nikotinpflaster, Lotionen, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes/Öle, etc.). Nicht auf Piercings, tätowierte Haut sowie Infusionsschläuche auftragen. Bei Verletzungen, Unverträglichkeitsreaktionen oder Unwohlsein ziehen Sie den Strumpf aus und reinigen Sie die Haut gründlich mit Wasser.

Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden! Klebelotion nicht in Kontakt mit Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Klebelotion nicht verschlucken. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen. Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit **BELSANA hafti** Klebelotion sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem sich der Benutzer befindet.



**Sicherheitshinweise:** Halten Sie die Rollkugel bei Anwendung stets sauber.



Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen.

Bei einer falschen Dosierung/Anwendung von **BELSANA hafti** kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse gegeben werden. Kinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen durch Pflege-

personal oder Angehörige in der Anwendung unterstützt werden. Halten Sie vor der Anwendung Rücksprache mit Ihrem Arzt, falls Sie Medikamente einnehmen, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Anti-allergika, topische Immunmodulatoren, etc.) oder Ihre Haut durch Verletzungen, Irritationen, Behandlungen etc. beeinträchtigt ist.

Für eine optimale Haftung ist es empfohlen, die Hautfläche, auf der die Klebelotion aufgebracht wird, vor der Anwendung zu rasieren oder zu enthaaren. **BELSANA hafti** nicht direkt nach der Rasur auftragen, um Hautreizungen und -sensibilisierungen zu vermeiden. Nach der Anwendung von **BELSANA hafti** Hände gründlich mit Wasser waschen, um Klebelotionsrückstände zu entfernen.

Aufgrund von Materialalterung kann die Leistungsfähigkeit von **BELSANA hafti** nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet werden. Das Haltbarkeitsdatum der Klebelotion ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Klebelotion verwenden. Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf. Die Klebelotion und den Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Ultrana GmbH stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.