

Fiche personnelle

Vous venez de recevoir votre nouveau collant de contention médical fabriqué sur mesure de la part de BELSANA. Pour une thérapie de compression efficace et durable, nous vous recommandons de consulter de nouveau votre médecin dans six mois. En cas de nécessité médicale, il pourra vous délivrer une nouvelle ordonnance. Pour toute commande supplémentaire, veuillez vous munir de ce certificat.

Nous serons ravis de vous conseiller !

Fiche personnelle

Votre sur-mesure est arrivé!



Aide-mémoire à afficher à votre machine à laver

Conseils d'entretien

Veillez laver à l'envers et ne pas utiliser d'assouplissant !

Lavage délicat

Pas d'agent blanchissant

Séchage délicat

Pas de repassage

Pas de nettoyage à sec



BELSANA

BELSANA

Pour faciliter votre prochaine commande, vous trouverez ci-joint **votre fiche personnelle** avec toutes les informations nécessaires. A détacher, plier et bien conserver.

Avec tous nos compliments
 Votre équipe BELSANA

Lavage

- Convient à une utilisation immédiate.
- Recommandation : laver le produit avant la première utilisation.
- Lavage quotidien (maximum 40 °C) à la main ou en utilisant le programme lavage délicat de la machine.
- Laver le produit séparément avec une lessive pour textiles délicats (p. ex., la lessive BELSANA blau40) et ne pas utiliser d'adoucissant.
- rincer abondamment, ne pas essorer et ne pas tordre.
- Faire sécher le produit à l'air libre sur une serviette ou utiliser le programme pour textiles délicats de votre sèche-linge. Ne jamais repasser et ne pas faire sécher sur un radiateur ou au soleil.

Composition de la matière

Les bas de contention sont composés de polyamide (Polyamid), d'élasthanne (Elastan) et, pour certains, de coton (Baumwolle). Vous trouverez les indications concrètes sur l'étiquette cousue dans vos bas.

Entretien

- Stocker le produit dans un environnement sec et à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur, de préférence dans son emballage d'origine.
- Les bas avec bandes adhésives recouvertes de silicone ne doivent pas être mis en contact avec des solvants, des pommades, des crèmes, ni des lotions nettoyantes nourrissantes, car leur adhérence peut s'en trouver durablement détériorée.
- Veiller à ce que vos pieds soient bien entretenus et à ce que vos chaussures soient dans un état irréprochable.
- Les bouloches sont un phénomène normal des matières textiles et ne constituent pas un motif de réclamation.
- Ne jamais réparer les détériorations des bas soi-même, mais les rapporter au détaillant chez qui ils ont été achetés.

Usage prévu

Les bas de contention s'utilisent pour le traitement de maladies phlébologiques et lymphologiques des bras et des jambes ainsi qu'en cas de lipodèmes. En fonction de l'indication, on utilise différents produits.

Remarques importantes

- Ne porter les bas de contention qu'après avis médical.
- Le port quotidien des bas et les examens de contrôle réguliers garantissent le succès du traitement.
- Seul un personnel médical professionnel formé peut délivrer les bas et fournir des conseils sur la bonne manière de les porter.
- En cas de douleurs aiguës ou de réactions cutanées, consulter immédiatement un médecin.
- Un léger ajustement régulier de la bande adhésive peut prévenir les irritations cutanées.
- En cas de problème qualité ou de réclamation, contacter le détaillant.

Action des bas de contention médicaux

Du fait des produits adaptés à chaque indication et du contrôle de la pression, le retour sanguin est accéléré, la microcirculation est améliorée dans les tissus et le flux lymphatique augmente.

Rev. 1/04/21

BELSANA
BELSANA Medizinische Erzeugnisse
 Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
 Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
 Wasserefeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
 Ofa Bamberg GmbH
 Laubanger 20
 D-96052 Bamberg

Pour la pharmacie: données du bas à conserver



La qualité haut de gamme de BELSANA

Votre produit BELSANA sur mesure est notamment conforme aux normes de qualité et d'examen les plus strictes au monde applicables pour les bas de contention médicaux (RAL-GZ 387/1) ainsi qu'au Standard 100 Oeko-Tex, qui impose l'utilisation de matériaux et de colorants ne présentant aucun danger.

Ensemble, nous prenons soin de vos jambes!

Indications

- (pour obtenir la liste complète, se reporter à la directive AWMF 037/005, version 1/2/18).
- Amélioration des symptômes veineux et de la qualité de vie en cas de maladies veineuses chroniques
- Prévention et traitement de l'œdème veineux
- Prévention et traitement des atteintes veineuses cutanées
- Dermatopolypodectosose et atrophie blanche
- Traitement des ulcères veineux et artériels (se reporter à la section Contre-indications)
- Veines variqueuses
- Phases initiale après traitement des varices
- Insuffisance veineuse fonctionnelle
- Malformations veineuses
- Thromboses veineuses
- État après thrombose
- Syndrome post-thrombotique
- Propylaxie de la thrombose sur patients mobiles
- Lymphoedème
- Œdème au cours de la grossesse
- Lipedème à partir du stade II
- États congestifs par suite d'immobilité (syndrome congestif arthrognone, parésies et parésies partielles des extrémités)
- Adiposité avec insuffisance veineuse fonctionnelle
- Dermatoses inflammatoires des jambes (Nausées, vertiges et douleurs congestives au cours de la grossesse
- État après inflammations
- Traitement des cicatrices

Contre-indications absolues

- Artériopathie périphérique avancée
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Phlébite septique
- Phlébite bleue

Contre-indications relatives

- Dermatoses suintantes
- Intolérances aux matériaux des bas de contention
- Graves troubles sensoriels des extrémités
- Neuropathie périphérique avancée (ex. diabète sucré)
- Polyarthrite chronique

Aucune responsabilité ne saurait être engagée de notre part en cas de non-respect de ces contre-indications.

Risques et effets secondaires

En cas de peau sensible, des démangeaisons et des problèmes de peau peuvent survenir sous les bas de contention. C'est pourquoi il est recommandé de prodiguer des soins cutanés adéquats. Si les symptômes suivants apparaissent, retirez immédiatement les bas et discutez de la poursuite du traitement avec votre médecin: coloration bleue ou blanche des orteils, paies-thésies et sensations d'engourdissement, douleurs croissantes, essoufflement et sueurs, limitations aiguës de la mobilité.

Obligation de déclaration

En raison de réglementations légales, nous sommes obligés de déclarer les patients et utilisateurs de notre produit qui ont subi une modification ultérieure du produit qui n'a pas été réalisée par l'entreprise fabricante (BfArM en Allemagne) tout fait grave ayant pu avoir entraîné la mort ou une aggravation significative de l'état de santé.

Élimination

À l'issue de la durée d'utilisation, veuillez éliminer le produit selon les réglementations locales.


Garantie

La durée de conservation des bas médicaux de contention est limitée à 3 ans dans des conditions de stockage correctes. À cela s'ajoute la durée de port qui se monte au maximum à 6 mois en cas d'utilisation régulière et de soins adéquats. À expiration de ce délai, les produits sont exclus de toute garantie. Sont fondamentalement exclus de la garantie les dysfonctionnements résultant d'une utilisation inadéquate. Réserve de l'utilisation inadéquate.


Ainsi avec ces conseils pratiques, l'enfilage du bas est bien plus facile.

L'enfilage du bas de compression médicale à pointe fermée

1. Pour enfiler votre bas, retournez-le à l'envers jusqu'au pied. Enfilez le bas ainsi retourné sur les orteils puis sur le cou-de-pied et le talon.

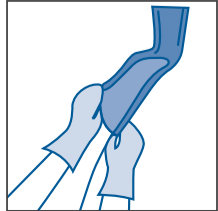

2. Faites glisser avec précaution la partie jambe du bas sur le talon. Évitez de tirer sur la bordure du bas ou sur le ruban anti-glissement.

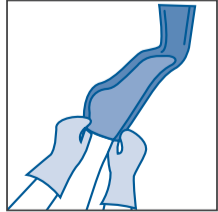

3. Enfin répartissez votre bas harmonieusement sur la jambe avec précaution. Évitez de tirer et ajustez le bas de façon uniforme à ce que tous les plis disparaissent.

