

BELSANA

Spitzenqualität

AUS DEM HAUSE BELSANA

Mit Ihrem BELSANA Produkt tragen Sie das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Die sorgfältige Verarbeitung und das hohe Qualitätsniveau werden durch den Einsatz modernster Technik gesichert und kontrolliert. Regelmäßige Zertifizierungen unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren unseren verantwortungsvollen Umgang mit unseren Produkten.

Ihr BELSANA Produkt erfüllt den OEKO-TEX® Standard 100, der die Verwendung von unbedenklichen Materialien und Farbstoffen vorschreibt.

Sollten Sie dennoch Beanstandungen oder Änderungswünsche haben, teilen Sie diese Ihrer Apotheke bitte in den ersten sechs Wochen nach Erhalt der Strümpfe mit.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie fit bleiben!

Indikationen (siehe auch Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie AWMF 037/005, Stand 12/18)

- Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
- Prävention und Therapie venöser Ödeme
- Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
- Ekzem und Pigmentierung
- Dermatoliposklerose und Atrophie blanche
- Therapie und Schmerzreduktion bei Ulcus cruris venosum, auch Rezidivprophylaxe
- Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
- Varikose
- Initiale Phase nach Varikostherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz
- Venöse Malformationen
- Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Lymphödeme
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Posttraumatische/postoperative Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme
- Lipödeme ab Stadium II
- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
- Berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
- Medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist
- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft

- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen:

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft: ABPI < 0,5, Knöchelarterien-Druck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg Fußrücken)
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Zu beachtende Risiken (Therapieentscheidung unter Nutzen/Risiko-Abwägung)

- Nässende Dermatosen
- Unverträglichkeiten auf Kompressionsstrumpfmaterialien
- Unverträglichkeiten der Kompressionsstrumpfinhaltsstoffe
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)
- Chronische Polyarthritis

Bei Nichtbefolgung dieser Kontraindikationen wird jede Haftung abgelehnt.

⚠ Risiken und Nebenwirkungen

Medizinische Kompressionsstrümpfe können Hautnekrosen und Druckschäden auf periphere Nerven verursachen. Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen. Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und die Fortführung der Therapie mit dem Arzt besprechen:

Blau- oder Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

Gewährleistung

Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Tragezeit, die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Nicht als Mangel gelten leichte Farbabweichungen, die aufgrund des individuellen Färbeprozesses entstehen können. Entsprechende Ware ist somit von Umtausch und Rücksendungen ausgeschlossen. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Für die Apotheke: Strumpfdaten zur Archivierung.



Wichtige Hinweise

- trocken, am besten in Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen
- Strümpfe mit silikonbeschichteten Hartbändern nicht mit Lösungsmitteln, Säuren, Cremes und rückfettenden Waschlotionen in Berührung bringen, da die Haltbarkeit dauerhaft beeinträchtigt werden kann
- unbedingt auf regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk achten
- Faserknötchen (Pilling) sind ein normaler Vorgang bei unbedingter auf regelmäßige Fußpflege und Textilen und kein Reklamationsgrund
- Schäden an Strümpfen niemals selbst reparieren, sondern zurück zu dem Fachhändler bringen, bei dem der Strumpf gekauft wurde

Zweckbestimmung

Kompressionsstrümpfe werden zur Therapie von phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen der Arme und Beine sowie bei Lipödemem eingesetzt. Je nach Indikation kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

Materialzusammensetzung

Verwendet werden Polyamid, Elasthan und Baumwolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingehäuteten Textiletikett.

an den Fachhändler wenden

- bei Qualitätsproblemen und Beanstandungen bitte Hautirritationen vorbeugen
- regelmäßiges leichtes Versetzen des Hartbands kann umgehend den Arzt auslösen
- bei akuten Beinbeschwerden oder Hautreaktionen bitte Fachpersonal erfragen
- Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Personal abgeben und Beratung zum richtigen Anziehen der Strümpfe
- Abgabe und Beratung zum richtigen Anziehen der Strümpfe
- tägliche Tragen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen sichern den Behandlungserfolg
- dem Arzt tragen
- Kompressionsstrümpfe nur nach Rücksprache mit dem Arzt tragen

Waschen

- für den sofortigen Gebrauch geeignet
- Empfehlung: vor dem ersten Tragen waschen
- tägliche Wäsche (max. 40°C), von Hand oder im Schonwaschgang der Maschine
- separat mit Feinwaschmitteln (z. B. BELSANA clean-Standard-Waschmittel), keinen Weichspüler verwenden!
- gut ausspülen, schonend schleudern aber nicht wringen
- auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang ihres Trockners trocknen, niemals bügeln und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Wirktprinzip medizinischer Kompressionsstrümpfe

Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

BELSANA

- Nicht chemisch reinigen
 - Nicht bügeln
 - Schonend trocknen
 - Nicht bleichen
 - Schonwaschgang
- BELSANA impuls bitte auf rechts bzw. BELSANA classic extra auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!**
- richtig waschen**
- Kompressionsstrümpfe**

Ihr Strumpfass für Nachbestellungen. Einfach abziehen, falten und aufbewahren.

nach Maß

überreicht durch

INDIVIDUELL
FÜR SIE GEFERTIGT

BELSANA

Strumpfass